

Kessie – Dinkelkernkissen

Das Dinkelkernkissen kann sowohl warm, als auch kalt angewendet werden. Aufgrund der Körnergröße ist es angenehm zum Auflegen.

Das Risiko einer Hautverbrennung wie zum Beispiel durch eine undichte Wärmflasche ist so gut wie ausgeschlossen. Der Überzug des Kernkissens kann abgenommen und in der Waschmaschine gewaschen werden – praktisch oder?

Produktdetails:

- Größe: ca. 22x16 cm
- Überzug: 100% Öko-Tex Standard 100 Baumwolle
- Innenkissen: 100% Öko-Tex Standard 100 Baumwolle in Canvasbindung
- Füllung: 100% Dinkelkerne ohne Chemie und ohne Genmanipulation
- in Handarbeit und Österreich gefertigt



Anwendung:

- Erwärme das Dinkelkernkissen in der Mikrowelle bei 750 Watt für 30 Sekunden und prüfe die Temperatur – möchtest du es wärmer? Dann lege es erneut in die Mikrowelle
- oder lege es in den Kühlschrank, wenn du es als Kühlkomresse verwenden möchtest
- Platziere anschließend das Kissen auf der gewünschten Körperstelle

Pflegehinweis:

- der Überzug ist Waschbar bei 40°C
- das innere Kissen nur feucht abwischen, falls es schmutzig werden sollte

Sicherheits- / Warnhinweise:

- Erhitze das Kissen nicht nass, zu lange oder unbeaufsichtigt – bei falscher Erwärmung besteht Brandgefahr!
- Verwende das Dinkelkernkissen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen, aufgrund von verschluckbaren Kleinteilen im Inneren
- Kontrolliere das Kissen vor jedem Gebrauch auf lose Nähte oder event. andere Mängel